

NEOSPLINT

DESCRIZIONE

Le SplintArt sono splint semplici e pratiche, create per immobilizzare gli arti. Il set comprende una gamma di steccobende completa per il trattamento di arti slogati o fratturati, le quali possono essere modellate secondo le necessità ed una volta applicate secondo le esigenze del caso, offrono una straordinaria rigidità. Data la leggerezza e l'adattabilità il set completo o i singoli pezzi si possono portare ovunque in quanto occupano pochissimo spazio. Inoltre, essendo realizzate in neoprene, mantengono la temperatura corporea.



COMPOSIZIONE

Struttura SplintArt in neoprene accoppiato con MTP D90 e cotone jersey nero
Anima rigida di alluminio modellabile a freddo
Chiusura e regolazione in velcro blu e arancio

DESTINAZIONE D'USO

Arti slogati
Arti fratturati

| CODICE | MISURA | Codice R.D.M. | Codice C.N.D. |
|--------|---|---------------|---------------|
| STE125 | Gamba | 74683/R | M030599 |
| STE123 | Braccio | 74727/R | M030599 |
| STE124 | Gomito-Caviglia | 74731/R | M030599 |
| STE123 | Avambraccio | 74732/R | M030599 |
| STE126 | Polso | 74737/R | M030599 |
| STE127 | Set Completo (borsa + 1 pezzo per misura) | 74761/R | M030599 |

MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. Appoggiare l'arto lesionato sullo SplintArt
 2. Modellare l'anima in metallo come si desidera
 3. Regolare e chiudere attraverso i velcri (il velcro di colore arancio indica la parte superiore)
- (Per riportare la SplintArt in posizione retta raddrizzare l'anima in metallo con le mani)

INDICAZIONI

Situazioni post-traumatiche o post-operatorie degli arti nelle quali sia necessario un valido sostegno e/o protezione dell'apparato scheletrico e dei fasci muscolari.

In caso di utilizzo dei dispositivi in presenza di lesioni della cute, proteggere la lesione con adeguata fasciatura; in tali situazioni non utilizzare il dispositivo a contatto diretto con la lesione.

Prodotto sanitario da applicare sotto controllo medico.

Radiotrasparente – Latex Free – Non sterile - Monopaziente.

CONTROINDICAZIONI / AVVERTENZE

Disturbi al sistema venoso, arterioso o linfatico. In caso di sospetta patologia in atto, consultare il proprio medico prima dell'uso. In ogni caso utilizzare per periodi prolungati nel tempo solo sotto controllo medico.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto, lontano dai raggi solari, fonti di calore e polvere.

Il prodotto non ha scadenza, ma la durata prevista è di anni 10 per i materiali e i componenti del dispositivo.

LAVAGGIO

- Lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri
- Sciacquare bene
- Non strizzare
- Lasciare asciugare orizzontalmente
- Non stirare

CONFEZIONAMENTO

Primario: Pezzi 1 in sacchetto in PVC

Secondario: box pezzi 5

CONFORMITA' DEL PRODOTTO/NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 93/42/CE

Dispositivo Medico di Classe I

ISO 9001:2008

PRODUTTORE

Artsanity S.r.l. – Via della Borsa, 18 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – ITALY



PVS SPA
via Leonardo da Vinci, 18
20051 Cassina de Pecchi MI IT
tel 02 9160011 fax 0291600149 mail info@pvs-spa.it

