



THE EXTRACTOR®

The EXTRACTOR è un dispositivo di primo soccorso utile contro i morsi di serpente, punture di calabroni, ragni e zanzare. L'aspirazione da 750 millibar e rimuove il veleno senza tagli in totale sicurezza.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:



Estrattore
4 tazze di suzione di diametro rispettivamente di 2,5 cm, 2 cm, 1,8 cm, 1,5 cm.
2 salviette igienizzanti a base alcool
2 cerotti 22x72
1 laccio emostatico

ISTRUZIONI D'USO

1. Inserire la tazza di suzione scelta nella bocca dell'estrattore e ruotarla fino a fissarla.
Per un miglior risultato scegliere con attenzione la tazza di suzione in funzione della dimensione del morso/puntura.



PVS SpA
Via Leonardo da Vinci, 18
20051 CASSINA DE PECCHI (MI) -Italy
Tel. +39 029160011
Fax +39 0291600149
Email : info@pvs-spa.it
Web: www.pvs-spa.it

cod.fiscale part.IVA/VAT IT 06532250153
cap.soc. Euro 619.748,28 i.v.
Reg.imprese MI n. 215184
R.E.A. MI n. 1103165



2. Per ottenere la massima aspirazione (750 millibar), il dispositivo di aspirazione deve essere il più verticale possibile.

3. L'aspirazione si crea semplicemente spingendo lo stantuffo verso il basso usando il pollice e due dita. Premere energicamente sullo stantuffo per ottenere la miglior prestazione. Non utilizzare una pressione eccessiva per evitare danni all'estrattore e alle tazze.



CURA E PULIZIA DELL'EXTRACTOR

- Verificare l'integrità dell'estrattore prima dell'uso
- Dopo l'uso lavare e sterilizzare le tazze di suzione dopo ogni utilizzo. Non far bollire le tazze in acqua.
- Il lavaggio dell'estrattore può danneggiare il meccanismo di creazione del vuoto nell'estrattore. Si consiglia la pulizia a secco.

ATTENZIONE

Si declina ogni responsabilità in caso d'uso improprio.