



Germo[®]
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germo.it

LINEA DISINFETTANTI SPECIFICI - SCHEDA TECNICA

STERMED

STERMED è un Presidio Medico Chirurgico clorossidante elettrolitico che possiede un'azione biocida contro i microrganismi; distrugge le componenti protoplasmatiche della cellula e interferisce sui sistemi enzimatici tramite l'azione dei radicali sulfidrilici (-SH). L'azione battericida del Cloro è superiore a quella di altri agenti ossidanti, come ad esempio il perossido di idrogeno. Inoltre le sue concentrazioni attive risultano tra le più basse rispetto a quelle di altri prodotti ad azione ossidante. Grazie a queste caratteristiche STERMED è ideale alla disinfezioni di superfici dure, di frutta e verdura e di oggetti utilizzati dai bambini quali, biberon, succhiotti o giocattoli.



ISTRUZIONI PER L'USO

Per la disinfezione delle superfici dure diluire STERMED al 5% e mantenere in contatto per 5 minuti.

Per la disinfezione della frutta e della verdura diluire STERMED al 2% e mantenere in contatto per 15 minuti. Risciacquare con acqua.

Per la pulizia e la conservazione dei biberon, oggetti per neonati, stoviglie impiegate in età neonatale diluire STERMED al 2% e mantenere in contatto per almeno 30 minuti. Lasciare in ammollo fino al momento dell'uso, lavare abbondantemente con acqua potabile.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
S640	Flacone da 1000 ml	Scatola contenente 12 flaconi

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110029903	08009110029903	342 l x 259 p x 293 h	40 ct (4 piani x 10)

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



Germodis®
S.p.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germo.it

LINEA DISINFETTANTI SPECIFICI - SCHEDA TECNICA

STERMED

COMPOSIZIONE

100,00 g di prodotto contengono:

Ipoclorito di Sodio 1,15 g; (equivalente a Cloro attivo 1,10 g), coformulanti, acqua depurata q.b. a 100,00 g.

CARATTERISTICHE

Liquido limpido paglierino, con un leggero odore di cloro.

ATTIVITÀ

Lo spettro d'azione è ampio e comprende batteri Gram-positivi, batteri Gram-negativi, funghi, micobatteri e virus (HBV, HCV, HIV). L'attività microbica del Cloro è maggiore se il pH tende a decrescere.

TEST

EN 1040; EN 1276; EN 1650; EN 13697; EN 14348; EN 13610.

AVVERTENZE

STERMED può scolorire alcuni tessuti e rilasciare gas pericolosi (Cloro). Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Tenere il prodotto lontano da cibo e mangime per animali.

VALIDITÀ

30 mesi. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto, al riparo da fonti di calore e luce diretta del sole.

CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

AUTORIZZAZIONI

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 19.313.